



SPIRIT

MEDICAL
SYSTEMS GROUP

A Heritage of Quality | The Spirit of Innovation



Trousse adaptative MA900 MAR Guide d'utilisation

Instructions pour assembler la trousse adaptative MAR


Merci d'avoir acheté la manivelle adaptative de réhabilitation (MAR) de **Dyaco Canada Inc.** Une fois installée sur un vélo de réhabilitation médicale Spirit ou la plupart des vélos d'exercice munis d'une manivelle trois pièces, l'ensemble MAR permet au clinicien ou à la clinicienne d'ajuster les vélos d'exercice afin de faciliter les capacités du rendement du patient ou de la patiente. Ceci comprend des ajustements indépendants d'un côté ou des deux côtés à partir d'une amplitude de mouvements limités aussi petits que 15 degrés dans un rendement d'amplitude de mouvements complets.

Les instructions suivantes devraient vous donner toute l'information nécessaire pour installer correctement la MAR sur votre vélo d'exercice. S'il manque des pièces ou si vous avez des questions au sujet de l'assemblage, communiquez avec votre représentant local Spirit.

Liste des pièces

Avant de commencer, veuillez vérifier si toutes les pièces et les outils sont dans la boîte. La boîte devrait contenir :

- 1 - ensemble de bras de manivelle (gauche et droit) munis d'un coulisseau ajustable
- 1 - ensemble de pédales (gauche et droite)
- 1 - ensemble de bras fixes de manivelle (gauche et droit)
- 1 - outil pour enlever la manivelle
- 1 - clef ouverte 14/15 mm
- 1 - clef allen 6 mm

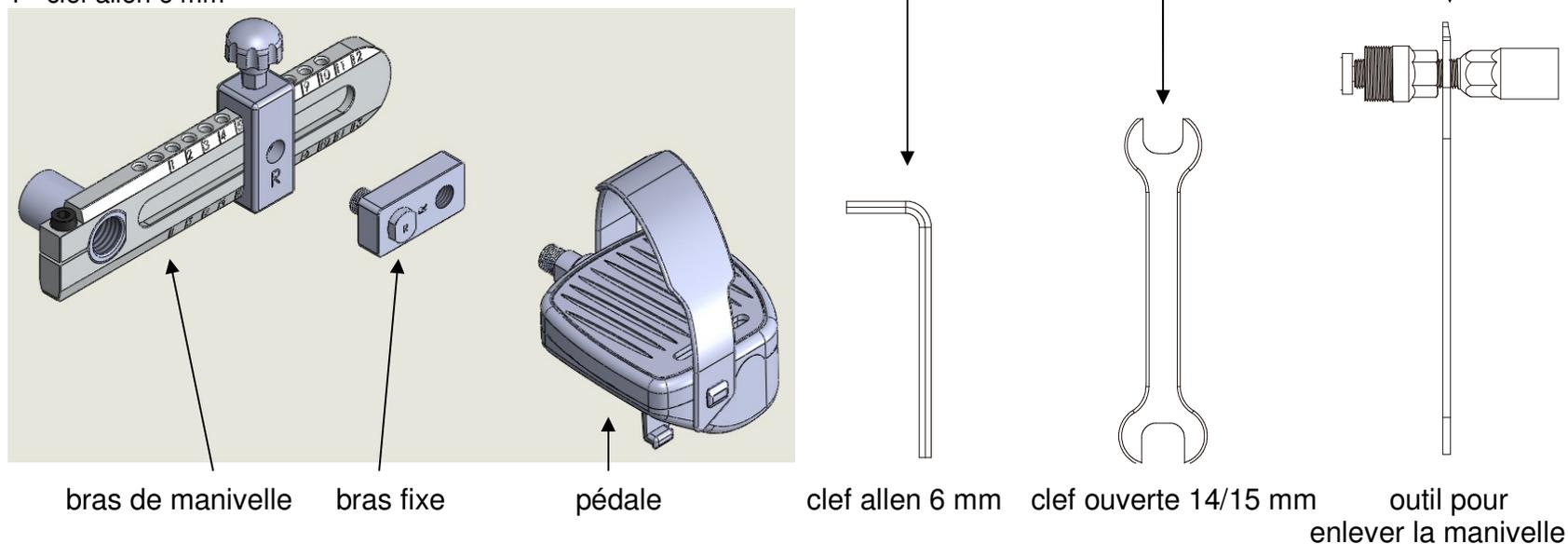

Instructions pour assembler la trousse adaptative MAR

INFORMATION IMPORTANTE : Les manivelles, les bras fixes et les pédales ont des filets gauches et droits. Ces articles sont marqués d'un L (gauche) et d'un R (droit) pour les identifier facilement. Les filets du côté droit du vélo d'exercice tourneront dans le sens des aiguilles d'une montre pour les serrer. Les filets du côté gauche du vélo d'exercice tourneront dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour les serrer.

NOTE : Les trois premières étapes indiquent comment enlever les bras de manivelle de votre vélo d'exercice. Certains vélos d'exercice peuvent différer de ces instructions.

1. Enlevez le capuchon antipoussière. Enlevez l'écrou qui retient le bras de manivelle en place à l'aide de l'outil pour enlever la manivelle.



2. Enlevez le capuchon argenté de l'outil tel que dans l'illustration. Vous n'aurez pas besoin de ce capuchon pour enlever la manivelle, mais ne le perdez pas parce vous en aurez besoin pour enlever le bras de manivelle de la MAR dans une étape ultérieure. Taraudez l'extrémité du baril noir de l'outil dans le bras de manivelle jusqu'à ce qu'il s'arrête, au moins quatre ou cinq tours complets.



3. Taraudez le boulon argenté complètement dans le baril noir jusqu'à ce qu'il s'arrête. Placez la clef rouge dans la partie hexagonale du baril argenté et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le bras de manivelle soit desserré. Enlevez le bras de manivelle.



4. Installez le bras de manivelle de la MAR sur l'essieu. Prenez l'écrou que vous avez enlevé à l'étape 2 et taraudez-le sur l'essieu à l'aide de l'outil pour enlever le bras de manivelle. Serrez l'écrou autant que possible. Installez le capuchon antipoussière lorsque vous avez terminé.



5. Installez et serrez les pédales. C'est beaucoup plus facile de serrer les pédales si l'extrémité opposée de la clef est orientée vers l'axe du pédalier tel que dans l'illustration ci-dessous. Si la clef est orientée dans l'autre sens, c'est très difficile de serrer la pédale fermement. La même chose s'applique pour serrer l'écrou de l'essieu à l'étape 4 ci-dessus.



Lorsque l'assemblage est terminé, pédalez le vélo d'exercice pour tester les nouvelles manivelles. Si vous ressentez la moindre hésitation à certains endroits dans la rotation ou s'il se produit un bruit sourd, vérifiez si l'écrou de la manivelle et les pédales sont bien serrés. Assurez-vous aussi que le bouton de réglage sur le coulisseau ajustable est serré.

AVIS IMPORTANT :

PRÉALABLE À CHAQUE UTILISATION, VÉRIFIEZ SI LES MANIVELLES ET LES PÉDALES SONT BIEN SERRÉES, SINON SERREZ-LES.

Bras fixe

En ajoutant le bras fixe, le patient ou la patiente qui manque de force peut utiliser le membre affecté en pédalant puisqu'il est passivement choisi par le membre qui n'est pas affecté à l'intérieur de son amplitude de mouvements prescrits. Le bras fixe pivote pour empêcher le patient ou la patiente de forcer.

NOTE : Le bras fixe peut aussi être installé sur un bras de manivelle régulier.

Installation:

Étape 1 : Enlevez la pédale.





Étape 2 : Installez le bras fixe.



Étape 3 : Installez la pédale sur le bras fixe.



Plan détaillé de la trousse adaptative MAR

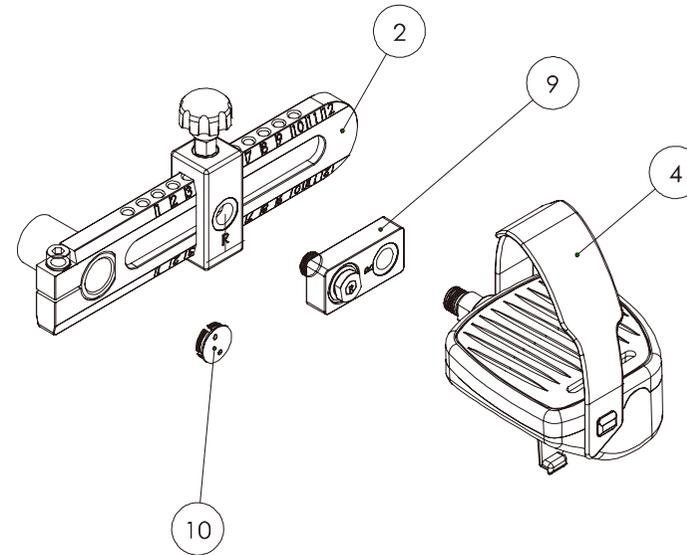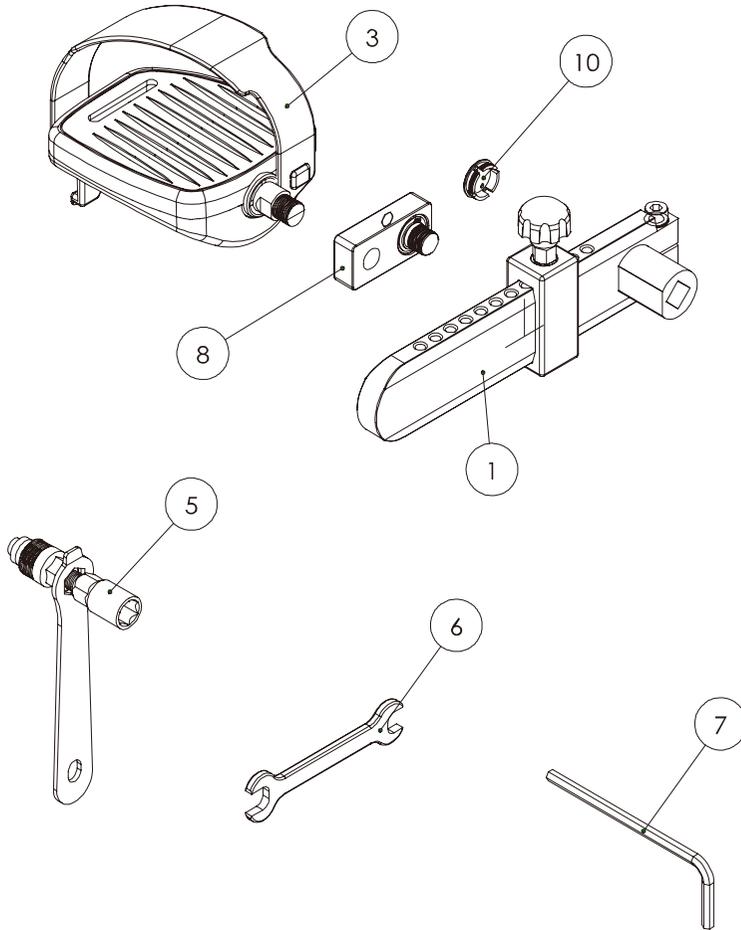

ARTICLE	DESCRIPTION	PIÈCE	QTÉ
1	Ajusteur de bras de manivelle G	CC060083	1
2	Ajusteur de bras de manivelle D	CC060084	1
3	Pédale gauche	N150016-A1	1
4	Pédale droite	N150017-A1	1
5	Outil pour enlever la manivelle	C141014	1
6	Clef ouverte 14/15 mm	J330041	1
7	Clef allen 6 mm	J330036	1
8	Petit ajusteur de bras de manivelle G	CC060085	1
9	Petit ajusteur de bras de manivelle D	CC060086	1
10	Capuchon antipoussière	P280009	2

Garantie limitée du fabricant

Dyaco Canada Inc. offre une garantie sur ce produit pendant un (1) an, à partir de la date de vente au détail, avec ou sans reçu d'achat. La responsabilité de Dyaco Canada Inc. comprend l'approvisionnement de nouvelles pièces ou de pièces fabriquées, au choix de Dyaco Canada Inc., et le soutien technique de nos concessionnaires indépendants et de nos compagnies d'entretien. En l'absence de concessionnaires ou de compagnies d'entretien, Dyaco Canada Inc. s'occupera directement de la gestion de ces garanties.

La présente garantie n'est pas transférable et seul le propriétaire initial peut s'en prévaloir.

La garantie ne couvre pas les produits qui ont été mal utilisés, négligés, accidentés ou réparés et modifiés sans autorisation.

La présente garantie remplace toute autre garantie expresse. Toute garantie implicite, y compris les garanties implicites de commercialisation ou de pertinence pour un usage particulier, sont limitées aux premiers douze mois et ce, à partir de la date d'achat.

Toutes autres obligations ou responsabilités, y compris les responsabilités relatives aux dommages indirects, sont par la présente exclues.

Service et réparation des pièces

Toutes les pièces de ce produit qui sont illustrées peuvent être commandées de DYACO CANADA INC., 6050, RUE DON MURIE, NIAGARA FALLS ON L2G 0B3. Les pièces commandées seront expédiées et facturées au prix courant. Les prix peuvent être sujets à changement sans préavis. Chaque commande doit être accompagnée d'un chèque ou d'un mandat poste. Vous pouvez vous procurer les petites pièces régulières à la quincaillerie locale.

Pour assurer un service prompt et courtois à la clientèle en cas d'erreurs ou pour répondre à vos questions, composez sans frais le 1888 707-1880, le 905 353-8955 (appel local) ou le 905 353-8968 (télécopieur) ou faites-nous parvenir un courriel à l'adresse suivante : customerservice@dyaco.ca. Nos bureaux sont ouverts de 8 h 30 à 17 h, HNE, du lundi au vendredi.

Mentionnez toujours les renseignements suivants lors de votre commande de pièces

- Numéro du modèle
- Nom de la pièce
- Numéro de chaque pièce



S'il vous plaît visitez les sites web indiqués ci-dessous pour des informations sur toutes autres marques et produits fabriqués et dist



www.dyaco.ca



www.dyaco.ca



www.dyaco.ca



www.dyaco.ca



www.spiritfitnesscanada.ca
www.dyaco.ca



www.spiritfitnesscanada.ca
www.dyaco.ca



www.solefitness.ca
www.dyaco.ca



www.trainorsports.ca
www.dyaco.ca



www.xterrafitness.ca
www.dyaco.ca